


# BACTICID WIPES

## DESINFITSEERIVAD RÄTIKUD

BACTICID WIPES on alkoholibaasilised sünteetilisest materjalist rätikud alkoholi taluvate meditsiiniseadmete pindade kiirdesinfektsiooniks. Toode on laia fungitsiidse ja bakteritsiidse toimega, hävitab Gram-positiivseid ja Gram-negatiivseid baktereid, sh.tuberkuloosi tekitajat, desaktiveerib nii ümbrisega kui ka ümbriset viirusi (sh HBV, HIV, noro-, rota- ja adeno) ja seeni.

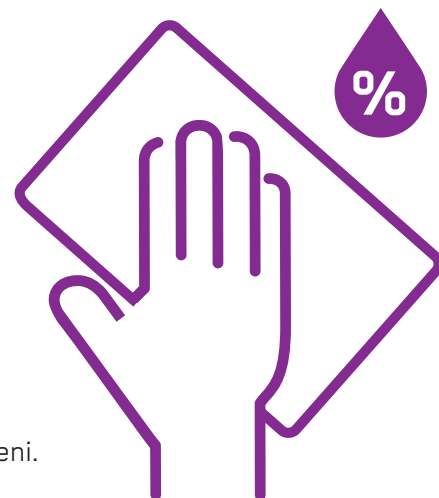

---

Tootes BACTICID WIPES on kasutatud puhast ja vähelenduvat etüülalkoholi, vältimaks respiraatorsete allergooside teket. Rätikud on ebemevabad, mittekoatud ega sisalda tselluloosi.

BACTICID WIPES ei vaja mahapesemist. Ei jäta pinnale ebemeid ega muuda pindade visuaalset väljanägemist.. Toode sobib kasutamiseks järgnevatel pinnakattematerjalidel: metallid- roostevaba teras, alumiinium, vask ja messing; põrandakattematerjalid - PVC, linoleum ja keraamilised plaadid ja plastikud, klaaspinnad.

---

### KASUTAMINE:

Avada kaane otsas olev klapp ja tõmmata sealt välja rätik kuni perforeeritud kohani. Rätiku lahtirebimiseks võib kaant teise käega toetada. Peale rätiku lahtitõmbamist sulgeda koheselt klapp, vältimaks rätikute kuivamist.

Desinfitseeritavad pinnad pühkida rätikuga nii, et kogu pind oleks ühtlaselt kiirdesinfektandiga niisutatud.

**Toimeaeg 30 sekundit.**

**Kui pinnal on nähtavat erist, eemaldada see esmalt puhastusainega, pind kuivatada ning desinfitseerida Bacticid wipesiga.**

---

---

**MIKROBIOLOOGIA:**

Mikroorganism		Toimeaeg
Escherichia coli	lahjendamata	30 sek
Enterococcus hirae	lahjendamata	30 sek
Staphylococcus aureus (MRSA)	lahjendamata	30 sek
Pseudomonas aeruginosa	lahjendamata	30 sek
Mycobacterium terrae	lahjendamata	30 sek
Mycobacterium avium	lahjendamata	30 sek
Candida albicans	lahjendamata	30 sek
Aspergillus Niger	lahjendamata	5 min
Kõik ümbrisega viirused: k.a HBV/HCV, HIV, Herpes simplex, H5N1	lahjendamata	30 sek
Aspergillus brasiliensis	lahjendamata	60 sek
Acinetobacter baumannii	lahjendamata	30 sek
Adenoviirused	lahjendamata	30 sek
Noro viirus	lahjendamata	15 sek
Vaccinia	lahjendamata	30 sek
Rota	lahjendamata	30 sek
Salmonella enterica subspecies typhimurium	lahjendamata	30 sek

Kuna BACTICID WIPES desinfitseerimislahus on läbinud testid BVDV (HCV surrogaat) ja vaccinia viirustele, inaktiveerib toode kõiki ümbrisega viiruseid. Nende katsetuste põhjal võib väita, et BACTICID WIPES desinfitseerimislahus on efektiivne ka nn. verrega edasikanduvate viiruste suhtes nagu HBV, HCV ja HIV, samuti viirusgruppidele nagu orthomyxoviirused (kaasaarvatud influensaviirus, H5N1) ja herpesviirused (Herpes simplex virus).

---

**Rätikute desinfitseerimislahus vastab**

**EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN14562, EN 14563 nõuetele.**

---

---

## ETTEVAATUSABINÕUD:

Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga!  
Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leکیدest ja muudest süüteallikatest.

Mitte suitsetada.

Hoida pakend tihedalt suletuna.

Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas



---

## KOOSTIS:

100g desinfektanti sisaldab: etanool 72 g, Alküül (C12-18) dimetüülbensüülammonium kloriid (ADBAC (C12-18)), etüülbensüülammonium kloriid (ADEBAC (C12-C14)) 0,0125 g)

Tootepakend on ümbertöödeldav.

**Registreeritud Raviameti meditsiiniseadmete osakonnas**

**Omab CE märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile**

---

Säilivus kinnises pakendis: 12 kuud

Säilivus avatud pakendis: 3 kuud

---

## PAKENDID:




100tk purgis  
(16 x 20 cm)



120tk purgis  
(20 x 20 cm)



150tk purgis  
(20 x 20 cm)

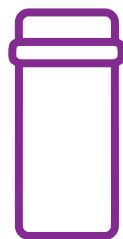

200tk purgis  
(20 x 20 cm)



600tk purgis  
(18 x 20 cm)



AS Chemi-Pharm  
Tänassilma tee 11, Saku vald 76406, Eesti  
[www.chemi-pharm.com](http://www.chemi-pharm.com)  
[chemi-pharm@chemi-pharm.com](mailto:chemi-pharm@chemi-pharm.com)