


STERISEPT PLUS

MEDITSIINISEADMETE PINDADE DESINFEKTSIOONI- JA PUHASTUSVAHEND

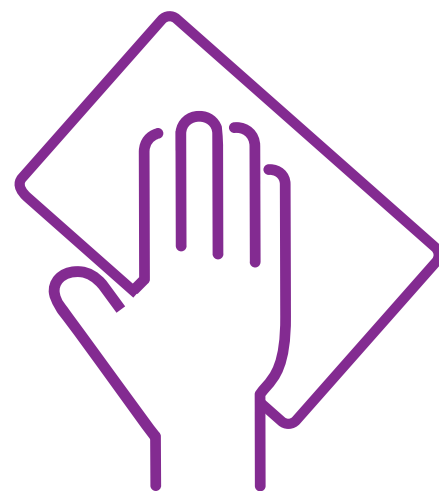

STERISEPT PLUS on vedel kontsentraat mitteinvasiivsete meditsiiniseadmete ja veepesu taluvate pindade desinfitseerimiseks ja pesuks. Toode on ette nähtud kutsealaseks kasutamiseks.

Sterisept Plusil on nii puhastavad kui ka desinfitseerivad omadused, tänu millele sobib see kasutamiseks tervishoiuasutustes kõikidel pindadel.

STERISEPT PLUS on sobilik kasutamiseks nii haiglates, toidu- ja ravimitööstuses, veterinaarias, laborites, hambaravikliinikutes kui ka teistes tervishoiuasutustes.

Toode on laia bakteritsiidse (sh tuberkuloositekitaja), sporitsiidse, virutsiidse ja fungitsiidse toimega, hävitab Gram- negatiivseid ja Gram-positiivseid baktereid, sh. tuberkuloosi tekitajat ja seeni, desaktiveerib nii ümbrisega kui ka ümbriseta viirusi (sh HBV, HIV, rota- ja adeno).

KASUTAMINE:

STERISEPT PLUS on kontsentraat. Lahjendus vastavalt nõutavale efektiivsusele (vt. mikrobioloogia).

Töölahuse valmistamiseks lahjendatakse toodet toatemperatuuril veega. Töölahus kantakse pinnale rätiku või lapiga, veendudes, et töödeldav pind oleks korrektselt kaetud. Soovituslik toimeaeg 15 minutit. Töödeldud pindu ei ole vaja loputada (va toiduga otseselt kokkupuutuvad pinnad).

Valmissegatud töölahus on kasutuskõlblik kuni 30 päeva. Säilitada seda õhutihedalt suletud nõus toatemperatuuril. Toode sobib kasutamiseks roostevabast terasest, klaasist, alumiiniumist, vasest, messingust ja keraamilistel pindadel, samuti linoleumil, PVC-l, kummist, plastikust ja silikoonist pindadel. Ei sobi kasutamiseks polükarbonaadist ja lakitud pindadel.

Sterisept Plus kasutuslahuses on kvaternaarseste ammooniumühendite kontsentratsioon vähem kui 0,5%.

Tähelepanu- STERISEPT PLUS ei sobi kasutamiseks koos aldehüüdidebaasil toodetega.

MIKROBIOLOOGIA:

Toime	Testi meetod	Toimeaeg/Kontsentratsioon	
		5 MIN	15 MIN
Bakteritsiidne	EN 13727 EN 14561	0,25%	0,25%
Pärmseentevastane	EN 13624	0,25%	0,25%
Mükobakteritsiidne	EN 14348	0,50%	0,50%
Kõik ümbrisega viirused	EN 14476	0,50%	0,25%
Rotaviirus	EN 14476	0,50%	0,25%

**STERISEPT PLUS on testitud vastavalt järgnevatele Euroopa standarditele:
EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN14348, EN 14476**

ETTEVAATUSABINÕUD:

Allaneelamisel kahjulik. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (suukaudne) ning võib põhjustada hingamisteede ärritust. Aure mitte sisse hingata, vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele)

SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.

Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt ohtlike jäätmete või vastavate pakendite või pakendijäätmete eeskirjadele

KOOSTIS:

100 g toodet sisaldab toimeaineid: Didecyl-Dimethyl-Ammonium Chloride (DDAC) 12,5g ; N-(3-amino-propyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 12,5g


Registreeritud Ravimiameti meditsiiniseadmete osakonnas
Omab CE märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile



PAKENDID:



5000ml kanister
dosaatorpumbaga

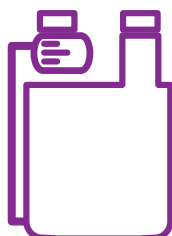

1000ml plastpudel
doseerimiskambriga



AS Chemi-Pharm
Tänassilma tee 11, Saku vald 76406, Eesti
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com