

BACTICID AF

ALKOHOLI BAASIL KIIRDEINFEKTSIOONIVAHEND MEDITSIINISEADMETELE

BACTICID AF on alkoholi baasil valmislahus alkoholi taluvate mitteinvasiivsete meditsiiniseadmete ja pindade kiirdeinfektsiooniks. Toode sobib kasutamiseks kohtades, kus on nõutav regulaarne kiirdeinfektsioon. Valmislahusena on seda mugav kasutada.



BACTICID AF on laia bakteritsiidse (k.a MRSA, VRE), mükobakteritsiidse (k.a Mycobacterium avium ja Mycobacterium terrae), virutsiidse (sh kõik ümbrisega viirused nagu HBV, HIV, HCV ning ümbriseta Adeno-, Noro- Polio- ja Vacciniaviirus), fungitsiidse ja pärmseentevastase toimega.

KASUTUSALA:

BACTICID AF on efektiivne vahend meditsiiniseadmete kiireks desinfektsiooniks kõrgendatud hügieeninõuete tingimustes, kus desinfitseerimine on tähtsaim profülaktiline abinõu infektsiooni vältimiseks, nagu näiteks:

- Haiglad ja teised tervishoiuasutused
- Operatsioonisaalid ja protseduuriruumid
- Intensiivpalatid
- Erakorralise meditsiini osakonnad
- Dialüüsiosakonnad
- Perearstid ja esmaabi
- Polikliinikud
- Laboratooriumid
- Hambaarsti kabinetid
- Patsientide koduhooldus
- Toiduainete tööstus ja suursöögid
- Ravimi- ja kosmeetikatööstus

KASUTAMINE:

BACTICID AF on valmislahus ja ei vaja lahjendamist. Kantakse pinnale niisutatud lapi või pihustiga.

Pinna desinfitseerimine pühkimisega: niisutada ühekordne mittekootud rätik BACTICID AF-ga ja pühkida sellega pinda.

Pinna desinfitseerimine pihustades: pihustada BACTICID AF pinnale kuni 30 cm kauguselt. Soovitav kasutada raskesti ligipääsetavate pindade puhul.

BACTICID AF on efektiivne kiirdesinfektsioonivahend erinevate meditsiiniinstrumentide ja pindade desinfitseerimiseks nagu operatsioonilauad, kandraamid, ratastoolid, kandikud, kärud ja haiglavoodid.

MIKROBIOLOOGIA:

| Mikroorganism | | Toimeaeg |
|--|--------------|----------|
| Escherichia coli | lahjendamata | 30 sek. |
| Enterococcus hirae | lahjendamata | 30 sek |
| Staphylococcus aureus | lahjendamata | 30 sek. |
| Pseudomonas aeruginosa | lahjendamata | 30 sek |
| Mycobacterium terrae | lahjendamata | 30 sek |
| Mycobacterium avium | lahjendamata | 30 sek |
| Candida albicans | lahjendamata | 30 sek |
| Kõik ümbrisega viirused (k.a HBV/HCV, HIV, Vaccinia) | lahjendamata | 15 sek |
| Adeno virus | lahjendamata | 30 sek |
| Noro virus | lahjendamata | 15 sek |
| Vancomycin-Resistant Enterococci (VRE) | lahjendamata | 30 sek |

BACTICID AF on testitud järgmiste Euroopa Liidu standardite järgi:
EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

ETTEVAATUSABINÕUD:

Vahend ja selle aurud on väga tuleohtlikud! Hoida eemale süttimisallikast - Mitte suitsetada!
Hoida lastele kättesaamatus kohas!
Hoida pakend suletuna! Kasutada kaitsekindaid!
Säilitada hästi ventileeritavas ruumis! Hoida jahedas!
Kõrvaldada sisu/mahutid kooskõlas kehtivate jäätmeäitlusseadustega.



KOOSTIS:

100g toodet sisaldab: etanool 57g, isopropanool 6g

Registreeritud Ravimiameti meditsiiniseadmete osakonnas
Omab CE märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile


PAKENDID:



500ml
pihustuspudel



1000ml
pihustuspudel

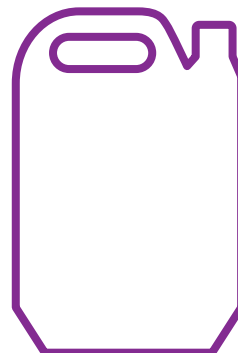

5000ml
kanister



AS Chemi-Pharm
Tänassilma tee 11, Saku vald 76406, Eesti
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com