

# STERISEPT INSTRU

Aldehüüdivaba kõrgastme meditsiiniinstrumentide  
puhastus- ja desinfektsioonivahend



Sterisept Instru on vahend termostabiilsete- ja labiilsete meditsiiniinstrumentide desinfektsiooniks ja desinfitseerivaks eelpesuks. Professionaalseks kasutamiseks!

## KASUTAMINE:

Sterisept Instru on kontsentraat. Lahjendus vastavalt nõutavale toimele (vt. tabel).

Instrumentide desinfektsioon ja pesu leotusmeetodil:

Aseta eelnevalt lahtivõetud instrumendid Sterisept Instru toatemperatuuril töölahusesse.

Puhastada instrumente mehaaniliselt ja veenduda, et need on pesuvannis korralikult lahusega kaetud. Peale vajaliku toimeaja möödumist loputada instrumendid põhjalikult.

Valmissegatud töölahus on sõltuvalt kasutuskoormusest kõlblik kuni 14 päeva. Kui lahus on visuaalselt kontamineerunud, tuleb see koheselt välja vahetada.

Tähelepanu- Sterisept Instru ei sobi kasutamiseks koos aldehüüdidebaasil toodetega!

Muude kasutusvaldkondade kohta saab informatsiooni tootelehel.

## KOOSTIS:

100 g toodet sisaldab toimeaineid: Didecyl-Dimethyl-Ammonium Chloride (DDAC) 15g;  
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 15g

TOIME	TEST/MEETOD	TOIMEAEG / KONSENTRATSION			
		5 min	15 min	30 min	60 min
Bakteritsiidne (sh. MRSA, VRE)	EN13727	0,5%	0,25%		
Bakteritsiidne	EN14561		0,5%	0,25%	
Pärmseentevastane	EN13624	0,5%	0,25%		
	EN14562	0,5%	0,25%		
Fungitsiidne	EN13624			1%	0,5%
Mükobakteritsiidne	EN14348		0,5%		
Mükobakteritsiidne	EN14563			0,5%	
Kõik ümbrisega viirused	EN14476	0,5%	0,25%		
Rotaviirus	EN14476		0,75%		
Noroviirus	EN14476		1%		
Spoorid (clostridium difficile)	EN13704				3%*

\*puhastes tingimustes

#### ETTEVAATUST.

Acute Tox. 4: H302 - Allaneelamisel kahjulik.

Aquatic Chronic 2: H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Skin Corr. 1A: H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

STOT RE 2: H373 - Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (Suukaudne).

STOT SE 3: H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

P260: Auru mitte sisse hingata. P273: Vältida sattumist keskkonda.

P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P301+P330+P331: ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.

P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all.

P305+P351+P338+ P310: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.


Eemaldada kontaktiläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.

P501: Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt ohtlike jäätmete või vastavate pakendite või pakendijäätmete eeskirjadele.

#### PAKENDID:



5000ml kanister

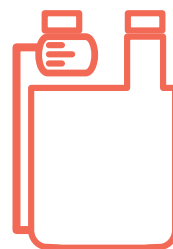

1000ml plastpudel  
doseerimiskambriga

