



Visiiri kokkupanemisjuhend

TÄHELEPANU! Toode on mõeldud kaitsmaks tolmu ja vedelike eest.

Vabasta visiiri ühendusavad, eemaldades ühenduskohtadest kaitsekile visiiri mõlemalt poolelt.

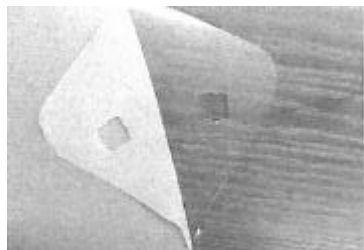

Hoia sõrmedega plastkrugi tagantpoolt paigal ning keera kruvi lahti. (Vt. pilti) Kontrolli, et plastist seib on paigas.

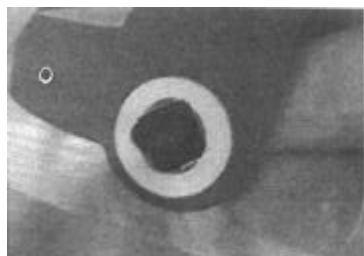

Aseta visiir paigale nii, et raamipoolne kandiline osa on visiiri kandilises augus ja keera mutter kinni.



Keera teise poole plastmutter lahti. Aseta visiir paigale nii, et raamipoolne kandiline osa on visiiri kandilises augus ja piiraja küljes olev nupuke on visiiri väiksemas augus ja keera mutter kinni.



Eemalda kaitsekile täielikult. Reguleeri peavõru oma peale sobivaks ja Ever-kaitsevisiir on kasutusvalmis. Tagumist plastkrugi reguleerides saad visiiri peavõru pingutada või lõdvendada.

